

Bei uns sind Sie in besten Händen

Kantonsspital Graubünden
 Departement Institute
Institut für Pathologie
 Loëstrasse 170
 CH-7000 Chur

 Tel. +41 (0)81 256 65 52
 Fax +41 (0)81 256 65 44
pathologie@ksgr.ch
www.ksgr.ch/pathologie

Verpackungsanweisung

Damit Patientenproben für die pathomorphologische Untersuchung möglichst intakt und ohne Gefährdung für die Umwelt bei uns ankommen, ist gemäss SDR-Verordnung eine 3-fache Verpackung für den Transport vorgeschrieben (Primärgefäss, Sekundärverpackung und Aussenverpackung). Die Verantwortung für die korrekte Verpackung liegt dabei gemäss SDR-Verordnung beim Absender.

Die folgende Anleitung soll Ihnen helfen, diese Proben sicher und richtig zu verpacken. Bitte verwenden Sie dafür möglichst die Ihnen von uns zur Verfügung gestellten Materialien!

	<p>Die Proben geben Sie in die geeigneten Primärgefässe (bei histologischen Proben mit Formalin 4% gefüllt: Verhältnis Gewebe zu Formalin = 1:10). Bitte achten Sie darauf, dass die Gefässe gut verschlossen sind!</p>
	<p>Wickeln Sie die Gefässe in genug saugfähiges Material (hier Zellstoff) ein, um eventuell auslaufende Flüssigkeit aufzusaugen.</p>
	<p>Geben Sie die Proben eines Patienten / Auftrags in einen Kunststoffbeutel (Sekundärverpackung mit absorbierendem Material).</p>
	<p>Legen oder stellen Sie die Kunststoffbeutel in die Transportkiste (Aussenverpackung) und polstern Sie diese gegebenenfalls mit Füllmaterial (z.B. Zellstoff, Luftpolsterfolie, Schaumstoff, Styropor) gut aus. Legen Sie die ausgefüllten Auftragsformulare dazu!</p>
	<p>Die Bezeichnung „FREIGESTELLTE MEDIZINISCHE PROBEN“ muss gut sichtbar auf der Aussenverpackung angebracht sein!</p> <p>Zum sicheren Verschliessen der grossen Boxen verwenden Sie bitte Kabelbinder.</p>

Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen zum korrekten Verpacken an unsere Fachpersonen (Tel. 081 256 65 52 od. 081 256 65 54) zu wenden! Diese helfen Ihnen gerne!